

Hilfsmittel im Alltag

Umgang im Alltag

Da das Hilfsmittel meist direkt auf der Haut aufliegt, ist eine regelmässige Reinigung und Pflege unverzichtbar. Weiterhin muss die Stabilität und Sicherheit jederzeit gewährleistet sein. Bei Druckstellen ungewöhnlichen Geräuschen oder Unbehagen beim Tragen des Hilfsmittels sollte unverzüglich ein Termin mit aniMotus vereinbart werden.

Reinigung und Pflege

Bandagen oder Polster aus Schaumstoff (EVA-Material) weisen eine geschlossene Zellstruktur auf. Mit einer milden Seife und einem feuchten Tuch sind sie einfach abwaschbar und entlegene Stellen können mit einer weichen Zahnbürste behandelt werden.

Lagerung

Hilfsmittel vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und trocken bei Raumtemperatur lagern.

Wartung

Im Alltag wird das Hilfsmittel viel gefordert. Kräfte wirken auf Materialien und Bauteile ein. Es ist ganz normal, dass Teile verschleissen können. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Hilfsmittel regelmässig warten zu lassen.

Tragen

Vor dem Tragen sollte Fell und Hilfsmittel auf Fremdkörper geprüft werden und Fell sollten trocken sein.

Für einen optimalen Halt soll das Hilfsmittel in der Richtung des Fellwuchses angelegt werden. Alle Verschlüsse werden gleichmässig angezogen. Überprüfen Sie nach einer gewissen Dauer Sitz und Halt des Hilfsmittels, um gegebenenfalls die Verschlüsse neu zu justieren.

Druckstellen vermeiden

- Hilfsmittel sollten bei längeren Ruhephasen abgezogen werden, so dass die Haut «atmen» und das Fell trocknen kann
- Hilfsmittel regelmässig reinigen und pflegen
- Fell und Hilfsmittel auf Fremdkörper prüfen
- Klettverschlüsse satt anziehen um Bewegungsreibung zu vermeiden