

Hilfsmittel im Alltag

Umgang im Alltag

Da das Hilfsmittel meist direkt auf der Haut aufliegt, sind eine regelmässige Reinigung und Pflege unverzichtbar. Vermeiden Sie den Kontakt mit abrasiven Medien (z. B. Sand, Staub). Weiterhin müssen die Stabilität und die Sicherheit jederzeit gewährleistet sein. Bei Druckstellen, ungewöhnlichen Geräuschen oder Unbehagen beim Tragen des Hilfsmittels sollte unverzüglich ein Termin mit aniMotus vereinbart werden.

Reinigung und Pflege

Polster, Polyolefine- und Karbonschalen sind waschbar und sollten regelmässig manuell mit 30°C warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gesäubert und anschliessend an der Luft getrocknet werden. Entlegene Stellen können zusätzlich mit einer weichen Zahnbürste behandelt werden.

Metall-Gelenke müssen bei Verschmutzungen umgehend gereinigt werden:

- 1) Metall-Gelenk mit reinem Süsswasser abspülen.
- 2) Metall-Gelenk mit einem Tuch abtrocknen oder an der Luft trocknen lassen.
- 3) Gelenk mit einem Trockenschmiermittel auf Silikonbasis einsprühen, damit es sich leicht und geräuschlos bewegen lässt. Keine Schmiermittel auf Ölbasis (z.B. WD40™) verwenden, da sich das Öl im Gelenkmechanismus mit Schmutz vermischen könnte.

Bei Kunststoff-Gelenken: den Gelenkmechanismus sauber halten und Schmutz, Sand und andere Fremdstoffe mit sauberem Wasser abspülen.

Lagerung

Hilfsmittel vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und trocken bei Raumtemperatur lagern. Ebenfalls direkte Hitzeeinwirkung vermeiden (z. B. Ofen- oder Heizkörperhitze).

Wartung

Im Alltag wird das Hilfsmittel viel gefordert. Kräfte wirken auf Materialien und Bauteile ein. Es ist ganz normal, dass Teile verschleissen können. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Hilfsmittel regelmässig warten zu lassen.

Hilfsmittel mit Gelenken müssen alle 6 Monate auf Verschleiss und Funktionalität geprüft werden. Für Hilfsmittel ohne Gelenke empfehlen wir eine Überprüfung alle 12 Monate.

Tragen

Vor dem Tragen sollten Fell und Hilfsmittel auf Fremdkörper überprüft werden, beide sollten trocken sein. Für einen optimalen Halt soll das Hilfsmittel in der Richtung des Fellwuchses angelegt werden. Alle Verschlüsse werden gleichmässig angezogen. Überprüfen Sie nach einer gewissen Dauer Sitz und Halt des Hilfsmittels, um gegebenenfalls die Verschlüsse neu zu justieren.

Druckstellen vermeiden

- Achten Sie darauf, dass das Produkt richtig sitzt, um das Risiko von Hautreizungen zu minimieren. Erhöhen Sie die Anwendungsdauer schrittweise, während sich die Haut an das Produkt gewöhnt. Wenn eine Rötung auftritt, verringern Sie vorübergehend die Anwendungszeit, bis sie abgeklungen ist.
- Hilfsmittel sollten bei längeren Ruhephasen abgezogen werden, sodass die Haut «atmen» und das Fell trocknen kann.
- Hilfsmittel regelmässig reinigen und pflegen
- Fell und Hilfsmittel auf Fremdkörper prüfen
- Klettverschlüsse satt anziehen, um Bewegungsreibung zu vermeiden.